

БИФЛУОРИД 12

Bifluorid 12

Разрешен к применению на территории
МЗ РФ № 2001/ 896

Информация по применению

Фторлак для лечения гиперестезии, для глубокой флюоризации и для профилактики кариеса.

Форма введения:

Фтористый лак из синтетических смол для точечной обработки кисточкой.

Действующие составные части:

фторид натрия и кальция

Свойства:

Бифлуорид 12 является быстросохнущим лаком, который хорошо фиксируется на сухой эмали зуба и на дентине. В связи с этим возможно достичь на длительный период времени интенсивной флюоризации подвергшихся тушированию поверхностей, в частности, в местах излюбленной локализации кариеса.

Бифлуорид 12 образует водонепроницаемую, способствующую изоляции от термических и химических защитную пленку.

Целью каждого применения **Бифлуорид 12** должно быть то, чтобы фтористый лак по возможности дольше оставался на обработанных поверхностях с тем, чтобы фтор мог оказать свое воздействие.

Область применения:

Для лечения гиперестезии шеек зубов и краев коронок.

Для фторирования эмали зуба и устранения чувствительности после сошлифовывания отдельных зубов или зубов всей челюсти.

Для профилактики вторичного кариеса по краям полости после наложения пломб, в частности, если применялась техника травления, а также после фиксации коронок, вкладок и мостов.

Способ применения:

Требуемые лечения поверхности очищаются и основательно высушиваются воздухом.

Бифлуорид 12 перед каждым применением встряхивается. Твердые частички должны хорошо диспергироваться. Находящиеся во флаконе два металлических шарика и достаточное пространство облегчают процесс встряхивания.

Бифлуорид 12 накапать на кисточку, а лучше нанести на **Пеле Тим (Pele Tim)** - шарики из губки и тушировать поверхность.

Внимание: Очень толстый слой отделяется довольно легко.

Лак, если возможно, разбавьте!

Фтористый лак оставить проникать на 10 - 20 сек. и высушить воздухом.

При правильном применении и надлежащей гигиене рта (**в течение 12 - 24 часов после применения препарата не чистить зубы**) **Бифлуорид 12** остается в течение нескольких дней на обработанной поверхности.

В этот период времени фтор оказывает воздействие на подвергшиеся обработке поверхности.

В случае повышенной чувствительности шейки и краев коронки зуба или при показаниях подобного рода лечение повторить два-три раза с промежутком в 7 дней. Поверхности только высушить и вновь тушировать.

Бифлуорид 12 должен быть жидкотекучим, так чтобы после встряхивания он легко капал из отверстия. В противном случае препарат необходимо разбавить при помощи предназначенного для этого растворителя. Растворитель также можно использовать для очищения инструмента и т. д.

Торговая форма Бифлуорид 12:

Комплект, 4 г с растворителем	Арт. № 1035
Флакон, 10 гр.	Арт. № 1033
Растворитель, 10 мл. флакон	Арт. № 1032
Большая упаковка 3 x 10 гр. 10 мл. растворителя и Пеле Тим (Pele Tim)	Арт. № 1234

Дополнительные указания:

Пеле Тим (Pele Tim) шарики из губки являются идеальными для всех жидких и пастообразных препаратов и особенно для нанесения **Бифлуорид 12, Амальгам Лайнер и Термолайн.**

Торговая форма Пеле Тим (Pele Tim) :

Поставляется размером № 1 (маленькие 4 мм.) около 3000 шариков и другие 4 размера.

Наши препараты разработаны для применения в стоматологии. Устные и/ или письменные указания, а также наши советы, основанные на детальном изучении материала, не обязывают Вас отказаться от использования выпускаемых нами материалов в соответствии с Вашей специальностью и по Вашему усмотрению. Однако применение наших материалов без нашего контроля находится исключительно в сфере Вашей собственной ответственности. Разумеется, мы гарантируем соответствие качества наших материалов действующим нормам, доставку и условия торговли - принятым стандартам.